

## Brancard Kong

Présentation :

Le brancard Kong se présente en 2 parties afin de faciliter son transport.



- |          |       |   |
|----------|-------|---|
| Partie 1 | Tête  | Composé d'un châssis alu pré monté et de la housse déjà fixée<br>(Ne jamais démonter la housse de la partie « Tête ») |
| Partie 2 | Pieds | Composé d'un châssis alu pré monté  |

Accessoires :

Vous trouverez différents systèmes de portage dans la housse

Chaque une des parties est numérotée afin de ne pas se tromper lors du montage

Il existe également une roue




Assemblage :




Emboîtez les 2 parties « Tête » et « Pieds » ensemble



Vérifiez que les clips soient bien verrouillés des deux côtés

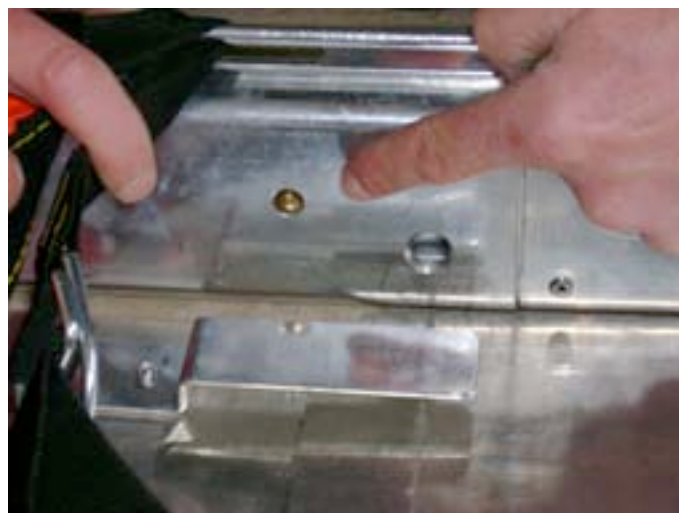


Vérifiez que la plaque « Pieds » soit bien sur la plaque « Tête » :

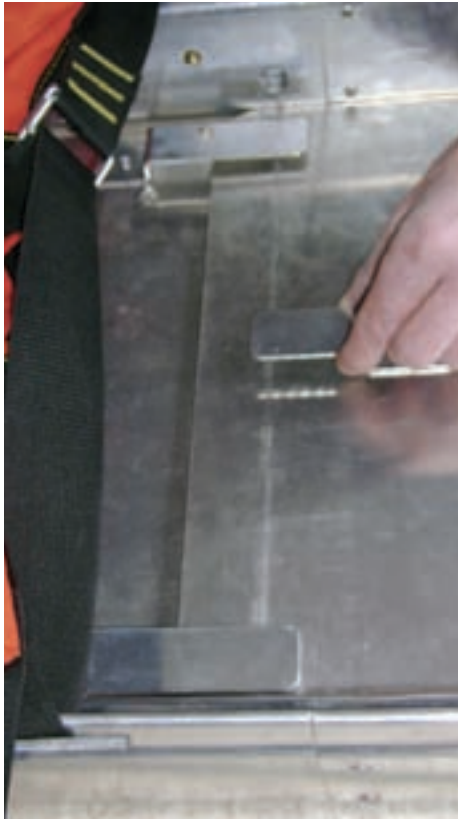

Insérez la tringle transversale en écartant les parties gauche et droite du brancard :



Contrôlez le bon positionnement de la barre transversale dans ses deux logements et resserrez la sangle transversale partie « Tête » :

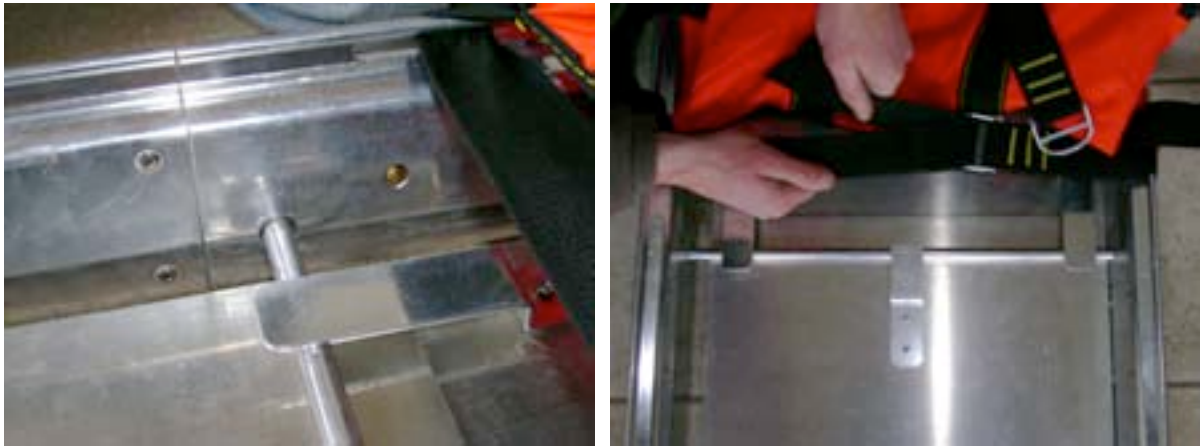

3 sangles sont à fixer sur la partie « Pieds » :

- Sangle 1      Transversale partie « Pieds »
- Sangle 2      Extrémité côté droit partie « Pieds »
- Sangle 3      Extrémité côté gauche partie « Pieds »



Fixez la sangle 1 en la passant dans les fentes prévues à cet effet de la manière suivante :



Puis assemblez et tendez la sangle 1 de la manière suivante :



Fixez les sangles 2 et 3 en les passant de la manière suivante :



Le patient sera sanglé à l'intérieur et à l'extérieur de la housse :

Sanglage intérieur du patient partie « Tête » et partie « Pieds »



Sanglage extérieur du patient partie « Tête » et partie « Pieds »



Mise en place du système de levage :



Placer les mousquetons rouges partie « Tête » au niveau des scotchs rouges avec la baïonnette vers l'intérieure en prenant les sangles de la housse et vissez les visses de sécurité



Placer les mousquetons bleus partie « Pieds » au niveau des scotchs bleus avec la baïonnette vers l'intérieure en prenant les sangles de la housse et vissez les visses de sécurité



Lors de l'utilisation des systèmes de portage accessoires, contrôlez que les goupilles de sécurité soient bien verrouillées

